

# tomas<sup>®</sup>-drill 1.0



REF 302-003-10

## Gebrauchsinformation

Der tomas<sup>®</sup>-drill 1.0 darf nur für Pilotbohrungen im Oberkiefer eingesetzt werden. Die Pilotbohrung sollte bei 800 min<sup>-1</sup> (max. 1500 min<sup>-1</sup>) und mit gekühlter physiologischer Kochsalzlösung erfolgen.

## Instructions for use

The tomas<sup>®</sup>-drill 1.0 is indicated for preparing maxillary pilot sites only. The pilot site should be prepared at 800 min<sup>-1</sup> (max. 1500 min<sup>-1</sup>) and chilled with physiological saline solution.

## Informations d'utilisation

Le tomas<sup>®</sup>-drill 1.0 ne doit être utilisé que pour un premier forage au niveau de la mâchoire supérieure. Le forage doit être effectué à une vitesse de 800 min<sup>-1</sup> (1500 min<sup>-1</sup> max.) et en utilisant un sérum physiologique à base d'une solution de chlorure de sodium frais.

## Información para el uso

La fresa tomas<sup>®</sup>-drill 1.0 debe ser utilizada solamente para perforaciones piloto en el maxilar. La perforación piloto debe realizarse a 800 min<sup>-1</sup> (máx. 1500 min<sup>-1</sup>) y con una solución fisiológica refrigerada de sal común.

## Informazioni d'uso

La tomas<sup>®</sup>-drill 1.0 deve essere impiegata esclusivamente per creare il foro pilota nel mascellare superiore. Il foro pilota deve essere eseguito a 800 min<sup>-1</sup> (max. 1500 min<sup>-1</sup>) e con soluzione fisiologica salina raffreddata.